

Navodila za pranje



Pralni stroj na 40°



**Dovoljena je uporaba sušilnega stroja,
pod pogojem, da ni prevroč!**



Po prejetju, vam svetujemo naslednje korake :

1. Prvo prilagodite spodnje hlače s senzorjem. Za pravilno delovanje morajo biti spodnje hlače oblečene.
2. Operite spodnje hlače s senzorjem po navodilih.
3. Spodnje hlače s senzorjem so pripravljene za uporabo.

Prosimo, da upoštevate naslednje:

- Ni priporočena uporaba tekočega detergenta. Velika ali pogosta uporaba detergenta in / ali mehčalca negativno vpliva na občutljivost spodnjih hlač s senzorjem in s tem alarmnim signalom.
- Spodnjih hlač s senzorjem ne sušite v sušilnem stroju ali na radiatorju, jih ne ožemajte in tudi ne likajte.
- Odstranite oddajnik s spodnjih hlač čez dan. S tem bo tudi življenjska doba baterij daljša in s tem preprečite tudi nenamerno pranje oddajnika v pralnem stroju.

Garancijsko obdobje na spodnje hlače s senzorjem je 3 mesece.



Mennonietenbuurt 29
1427 AX Amstelhoek
Tel: 0297 - 760 001
Fax: 0297 - 760 002

WWW.URIFOON.SI • INFO@URIFOON.SI

